

NIO-SIM-A

Automatyczne wklucie do nauki procedury dostępu doszpikowego







Cechy:





- Nauka procedury dostępu doszpikowego I.O. u osób dorosłych
- NIO-SIM-A odzwierciedla kliniczne NIO-A, dzięki czemu eliminowane są potencjalne błędy podczas wykonywania procedury dostępu doszpikowego w praktycznie w każdych warunkach;
- NIO-SIM-A jest w pełni bezpieczne w użyciu (mechanizm pozbawiony igły), nie ma konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów czy trenażerów;
- NIO-SIM-A jest poręczne, lekkie i łatwe w użyciu;
- NIO-SIM-A wyposażone jest w system ładujący, dzięki czemu NIO-SIM-A, może być wielokrotnie wykorzystywane;
- NIO-SIM-A pozbawione jest zewnętrznego źródła zasilania czy baterii.

Instrukcja postępowania:

1. Naklej na podstawę stabilizatora NIO-SIM-A jedną z dołączonych, dedykowanych dwustronnych naklejek i zdejmij powłokę zabezpieczającą;
2. Miejsce iniekcji I.O.:
 - 2a. Pierwszorzędne miejsce wkłucia: bliższy koniec kości piszczelowej ok. 2 cm przyśrodkowo oraz 1 cm proksymalnie względem guzowatości piszczeli.
 - 2b. Drugorzędne miejsce wkłucia: głowa kości ramiennej
3. Umieścić niedominującą rękę w dolnej części NIO-SIM-A (w miejscu karbowania/kropek) i ustawić igłę w pod kątem 90 st. względem skóry w miejscu wkłucia. Niedominująca ręka powinna pozostawać w tej pozycji przez cały czas wykonywania procedury.
4. Odbezpieczyć igłę NIO-SIM-A przekręcając nakrętkę o 90 st. w którąkolwiek ze stron.

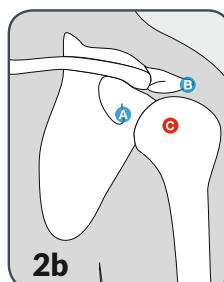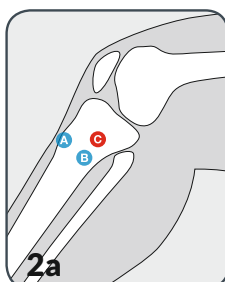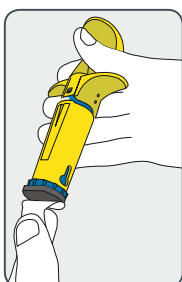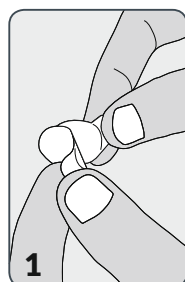

5. Umieścić dłoń dominującej ręki na nakrętce. Przycisnąć urządzenie do skóry pacjenta utrzymując nacisk. Przyciskając urządzenie pociągnąć łopatki triggera w górę. Działanie to aktywuje urządzenie.
6. Ostrożnie pociągnąć urządzenie NIO-SIM-A w górę ruchem obrotowym, jednocześnie przytrzymując podstawę stabilizatora igły w miejscu wkłucia.

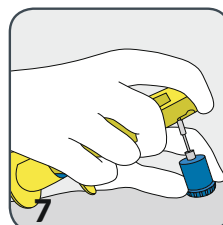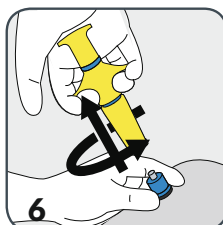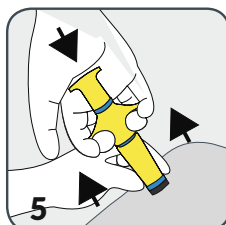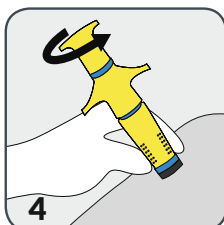

7. Nadal przytrzymując stabilizator w miejscu, wyciągnąć mandryn (niezbędne może okazać się przekręcenie go).

Instrukcja ładowania:

- **1.** Umieścić NIO-SIM-A w systemie ładującym, tak aby łopatki triggera były umieszczone w dedykowanych przestrzeniach;
- **2.** Nasadą dłoni ręki dominującej dociśnij do oporu nakrętkę w dół, następnie palcami ręki niedominującej opuść łopatki triggera do momentu usłyszenia dźwięku „klik”.
- **3.** Zabezpiecz urządzenie NIO-SIM-A przekręcając nakrętkę o 90 st. w którąkolwiek ze stron.
- **4.** Ustaw stabilizator NIO-SIM-A na płaską powierzchnię, a następnie umieść NIO-SIM-A na stabilizatorze NIO-SIM-A. Przekręć urządzenie do momentu, gdy łopatki triggera zostaną zamknięte.
- W przypadku wystąpienia problemów z użyciem NIO-SIM-A, dociśnij nasadą dłoni ręki dominującej nakrętkę, jednocześnie przytrzymując palcami ręki niedominującej miejsce karbowania/kropek w celu rozładowania NIO-SIM-A i rozpocznij procedurę ładowania ponownie.

